



Pobierz materiał



Opisz próbki

**Wypełnij odpowiednie
Zlecenie Badań**


dostępne również na:
www.laboklin.pl



**Wyślij do nas
przygotowany
materiał**



Odbierz wynik

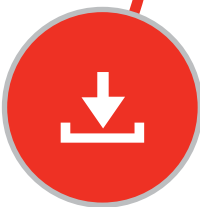

Zamów materiały wysyłkowe i informacyjne

Materiały wysyłkowe i informacyjne można zamówić zaznaczając daną pozycję na ostatniej stronie zlecenia badań, kontaktując się z Obsługą Laboratorium telefonicznie, przez e-mail lub wypełniając formularz dostępny na naszej stronie internetowej:

www.laboklin.pl/materialy

Niniejszą ulotkę, a także wiele innych użytecznych informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.laboklin.pl w zakładce WETINFO, również w wersji do pobrania.

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

www.laboklin.pl

LABOKLIN Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa

OBSŁUGA LABORATORIUM:
tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, infolinia: 800 100 101
fax: +48 22 691 92 92, e-mail: lab.warszawa@laboklin.com

22 691 93 10
lab.warszawa@laboklin.com

LABOKLIN
POLSKA SP. Z O.O. | LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Zasady pakowania materiału biologicznego przesyłanego do laboratorium



www.laboklin.pl

Zasady pakowania materiału biologicznego przesyłanego do naszego laboratorium za pośrednictwem firmy kurierskiej



1

- Materiał biologiczny należy pobierać do szczelnych opakowań bezpośrednich – probówki, pojemniki na mocz, naczynia na wycinki patologiczne itp.



2

- Opakowanie bezpośrednie należy umieścić w opakowaniu transportowym, jakie wysyłamy do Państwa dodatkowo. Opakowanie to spełnia wymogi firmy transportowej – jest ono szczelne, trwałe oraz zawiera wkład absorbujący, którego nie należy usuwać. Naczynie na wycinki patologiczne od razu dostarczamy w opakowaniu ochronnym.



3

- Tak zapakowany materiał należy umieścić w kopercie / worku foliowym jaki dostarczamy do Państwa.
- Kurier dodatkowo włoży tak przygotowany worek do własnego opakowania.



4

- Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić naklejkę z symbolem UN3373. Naklejki te będziemy wysyłać Państwu wraz z materiałami do badań.
- Waga przesyłki nie powinna przekraczać 1 kg a objętość 4 l.

Jak zamówić kuriera?

FIRMA KURIERSKA TNT

Kuriera można zamówić telefonicznie dzwoniąc do nas na numer:

+48 22 691 93 10, +48 790 790 780

800 100 101 (dla Klientów spoza strefy 22)

materiał doręczany jest w ciągu 24h (od pon. do pt.).

Inne możliwości dostarczenia materiału:

LISTY PRIORYTETOWE

Można wysłać list priorytetowy na naszą skrytkę pocztową, materiał zazwyczaj doręczany jest w ciągu 24/48h.

DORĘCZENIE OSOBISTE

Zapraszamy do naszego Laboratorium w Warszawie.

NA TERENIE WARSZAWY

Jeżdżą nasi lokalni kurierzy, zgłoszenia odbioru przyjmujemy telefonicznie.

